



OTI-PROTECT

30 ml

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Уважно прочитайте інструкцію з використання, що міститься в упаковці, та збережіть її на випадок потреби, оскільки вона містить важливу інформацію для пацієнта щодо використання спрею PEDIKID® OTI-PROTECT.

Засіб для гігієни вух.

REF : ENT07

1.) Що таке PEDIKID® OTI-PROTECT?

Вушний спрей PEDIKID® OTI-PROTECT змащує та зволожує слуховий прохід, щоб природним чином видалити надлишок вушної сірки, яка може затримувати сторонні тіла (пил, бактерії тощо), а також залишки води під час купання або водних видів спорту. Завдяки ефірній олії м'яти перцевої, він дарує приємне відчуття свіжості при нанесенні.

2.) У яких випадках використовувати PEDIKID® OTI-PROTECT?

Фізіологічно вушна сірка захищає вухо від пилу, сторонніх предметів та інфекцій. Це природний бар'єр, що запобігає росту бактерій, вірусів та грибків. Вушна сірка змащує зовнішній слуховий прохід, що захищає шкіру від незначних пошкоджень і запобігає проникненню води в слуховий прохід. Дрібні сторонні предмети (наприклад, пил), які потрапляють у вухо, знерухомлюються, а потім виводяться з вуха шляхом самоочищення. Вушна сірка висихає, утворюючи невеликі маси, які рухаються до периферії і потім випадають з слухового проходу.

У деяких людей вузькі або специфічної форми слухові канали, тому навіть невелика кількість вушної сірки має тенденцію накопичуватися у вусі, або ж у інших вушна сірка виробляється в більших, ніж у середньому, кількостях. Механізм самоочищення може давати збій, і вушна сірка має тенденцію надмірно накопичуватися у вусі. Схильність до надмірної секреції вушної сірки може бути вродженою і призводити до відкладення з раннього віку (у немовлят і дітей). Іншою важливою причиною збільшення секреції вушної сірки є механічне подразнення поверхні слухового каналу у людей, які використовують ватні палички.

Інфекції вушної раковини (зовнішнього вуха) можуть виникнути внаслідок: розчісування (тертя) епідермісу слухового каналу під час механічного видалення вушної сірки; шкірна мацерація, що виникає внаслідок частого потрапляння води в зовнішній слуховий канал; або ж внаслідок використання слухових апаратів. У разі інфекції вушної раковини (зовнішнього вуха) важливо очистити вухо від будь-яких залишкових виділень. Однак такі дії можна проводити лише після того, як лікар встановить причину інфекції зовнішнього вуха (бактеріальну або грибкову).

Використовуючи медичний пристрій, слуховий прохід підтримується в чистоті, що запобігає накопиченню вушної сірки та протидіє наслідкам її затримки (наприклад, запаленню).

3.) Властивості та показання PEDIKID® OTI- PROTECT

- Гігієна вуха
- Природним чином усуває вушну сірку
- Запобігає утворенню пробки
- Очищає вухо від виділень, що виникають внаслідок зовнішнього отиту, особливо зовнішнє вухо (допоміжне лікування).

4.) Дозування та інструкція із застосування PEDIKID® OTI- PROTECT

- Лише для зовнішнього застосування. Цей продукт призначений для немовлят віком від 3 місяців, дітей та дорослих.
- Слідкуйте, щоб спрей не потрапив в очі, ніс або рот.

Дозування:

- **У разі надлишку вушної сірки:** Розпилювати 1-2 дози в кожен слуховий прохід 3-5 разів на день до повного видалення сірки.
- **Для профілактики, щоб обмежити накопичення вушної сірки:** Розпилювати 1-2 дози в кожен слуховий прохід 1-2 рази на тиждень.

- **Для профілактики, перед купанням або водними процедурами:** Розпилювати 1-2 дози в кожен слуховий прохід безпосередньо перед купанням.

Як використовувати:

- Зовнішній слуховий канал

Перед використанням струсіть флакон PEDIKID® OTI-PROTECT і натисніть кілька разів, доки не з'явиться рідина. Вставте наконечник у зовнішній слуховий канал і введіть відповідну дозу. Повторіть цю дію для іншого вуха.

- Зовнішнє вухо

У разі інфекції зовнішнього вуха (вухної раковини) дозування має визначитися лікарем.

Спрей забезпечує рівномірне розпилення та точне дозування і є **альтернативою ватним паличкам.**

Після використання очистіть наконечник водою. З міркувань гігієни та для запобігання можливому перенесенню інфекції рекомендується використовувати один спрей на особу. Не торкайтеся наконечника, щоб зберегти характеристики продукту.

5.) Запобіжні заходи при використанні PEDIKID® OTI-PROTECT

Тримати в недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці у вертикальному положенні при температурі від 15° до 25°C. Не використовувати, якщо продукт пошкоджений. Не використовувати після закінчення терміну придатності, надрукованого на упаковці. Продукт слід використати протягом 6 місяців після першого використання. Не використовувати у разі підвищеної чутливості або алергії на інгредієнти. Не використовувати у разі перфорації барабанної перетинки, інфекції, болю у вусі або виділень. У разі інфекції, болю або інших тривожних симптомів медичний виріб не слід використовувати без попередньої консультації з лікарем. Уникайте розпилення в очі, ніс або рот. Для немовлят і маленьких дітей проконсультуйтеся з лікарем.

6.) Умови зберігання PEDIKID® OTI-PROTECT

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 15 до 25 °C.

7.) Склад PEDIKID® OTI-PROTECT

PEDIKID® OTI-PROTECT містить 100% натуральних інгредієнтів: оливкову олію фармацевтичної якості, ефірну олію м'яти перцевої.

8.) Опис упаковки PEDIKID® OTI-PROTECT

PEDIKID® OTI-PROTECT упакований у флакон, що містить 30 мл продукту, що відповідає 214 дозам.

Індивідуальна упаковка включає: коробку, флакон 30 мл з етикеткою та інструкцію з використання.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА УПАКОВЦІ



Виробник



Термін придатності



Номер партії



Номер каталогу



Ознайомтеся з інструкцією з використання



15 °C - 25 °C Температура зберігання



Не використовувати, якщо упаковка пошкоджена

PEDIKID® OTI-PROTECT - це медичний пристрій



PEDIKID® - це бренд Laboratoires INELDEA

PEDIKID® OTI-PROTECT є медичним пристроєм, виготовленим компанією:

Gofarm Sp. z o.o. Sp. k.

21/26 rue Gornikow

30 -819 Cracovie, PL

www.gofarm.pl

Сертифіковано за стандартом ISO 13485 для

Laboratoires INELDEA

06510 Carros - France

www.pediakid.com

Дата оновлення інструкції з використання:

Січень 2020 року.

Номер версії: 020620V2 020620V2

PDOP2/IU/01/2020